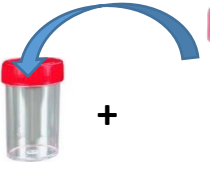


INSTRUCTION DE PRELEVEMENTS DE BACTERIOLOGIE POUR CLINIQUES

PA-I-048-02

Type prélèvement	Écouvillons à prélever	Transport, conservation
Prélèvement divers (COVID, Plaie, Prélèvement général...)		Prélever : 1. Ecouvillon ESWAB rose ou orange 2. Casser l'écouvillon dans le milieu Transport à température ambiante (TA) →Prélèvement de plaie, nettoyer en 1^{er} avec du sérum physiologique →Des eswab violets sont possibles pour les prlmts COVID 
Prélèvements bloc divers		Le flacon rouge n'étant pas équipé de milieu de conservation, au bloc transférer le contenu <u>d'un ou de 2 swabs roses</u> dans le <u>flacon rouge</u>. Le prélèvement doit être maintenu à température ambiante (TA).
Liquides de ponction		Répartir le liquide dans un ESWAB rose et un tube citraté (bleu) Le prélèvement doit être maintenu à TA (cytologie urgente) Si cytologie demandée : un tube citraté permet de mieux conserver l'aspect des cellules et des cristaux. 
Expectorations		Transférer 1 ml d'expectoration dans le milieu « solution SL » Agiter  Stable pendant 6h à TA ou 48h au frigo (+4°) sur solution SL. Transport à température ambiante ! Si recherche de BK transmettre le flacon primaire
ECBU		Remplir totalement le tube Borate. Urine en tube borate (vert) : (pas de frigo!) Transport mettre le flacon primaire et le borate dans le sachet Transport : Température ambiante (TA)
Coproculture Parasitologie des selles		Effectuer 7 Prélèvements dans des endroits différents de la selle (privilégier les zones glaireuses) à l'aide de l'écouvillon FecalSWAB et décharger dans le milieu Transport à température ambiante Faire 1 faecalswab pour la copro Et un 2^e si parasito demandée 
HEMOCULTURE		- Se laver les mains avec une solution hydro-alcoolique puis mettre des gants, - Désinfecter avec de l'alcool à 70 °C, ne pas oublier l'opercule - Prélever en premier le flacon aérobique (vert) pour chasser l'air de la tubulure puis flacon anaérobique (orange) - Prélever 10ml par flacon (jusqu'à la ligne blanche <u>pour un adulte</u>)/ Homogénéiser le flacon par 2 à 3 retournements. Stable pendant 24h à TA A transférer dès que possible au laboratoire !